

ÁREA PARASITOLOGÍA
SUBPROGRAMA DE COPROPARASITOLOGÍA
INSTRUCTIVO DE MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL

En el sobre encomienda, usted encontrará el material de control suministrado para esta evaluación: deposición de origen humano analizada por el Método de Burrows Modificado y la tinción de Ziehl Neelsen Modificado.

PRECAUCIONES

El material de control debe considerarse como potencialmente infectante, por lo tanto debe manipularse con todas las medidas de bioseguridad descritas para el manejo de muestras de sangre y fluidos corporales, emitidas por el Ministerio de Salud. “Precauciones universales con Sangre y Fluidos corporales”, folleto “Normas de Aislamiento y Manual de Procedimiento”, 1988.

CONSERVACIÓN

Las muestras se pueden conservar a temperatura ambiente hasta su observación, ya que han sido colectadas con el fijador y conservador PAFS.

ANÁLISIS DEL MATERIAL DE CONTROL

1. Lea cuidadosamente el capítulo del Instructivo correspondiente a este Subprograma.
2. El material de control está procesado y concentrado, listo para su utilización.
3. Se deben realizar **4 preparados**, entre porta y cubreobjetos (22x22)mm., tomando una gota de este concentrado y tiñéndolo con MIF, Tionina o CVS.
4. Se recomienda sellar con esmalte de uñas o silicona las preparaciones observadas.
5. Observe las muestras como una más dentro de la rutina diaria.
6. Se recomienda recorrer el preparado completo con lente objetivo 10x, luego con 40x y ante duda con 100x.
- 7. Guarde las muestras y láminas observadas hasta recibir el informe de resultados de la evaluación.**

INFORME DE RESULTADOS

1. Informe su respuesta en la planilla de resultados adjunta.
2. Utilice la tabla de códigos para informar lo elementos encontrados.
3. Complete toda la información solicitada, con la codificación correspondiente.
4. Los resultados deben informarse dentro del plazo estipulado en la **Hoja de Respuesta** de cada envío.

Frente a cualquier inconveniente presentado con le material enviado, por favor informar a la brevedad para tener opción a un nuevo envío.