



PARASITOLOGÍA
SUBPROGRAMA *Pneumocystis jiroveci*
INMSTRUCTIVO DE MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL

En el sobre encomienda, usted encontrará el material de control suministrado para esta evaluación: lavado bronqueoalveolar o material de origen animal, previamente seleccionado por tinción de Azul de Toluidina O, Metenammina Argéntica e Inmunofluorescencia Directa.

PRECAUCIONES

El material de control debe considerarse como potencialmente infectante, por lo tanto debe manipularse con todas las medidas de bioseguridad descritas para el manejo de muestras de sangre y fluidos corporales, emitidas por el Ministerio de Salud.

CONSERVACIÓN

Se recomienda conservar las muestras refrigeradas (entre 2 a 8 ° C) hasta su procesamiento.

ANÁLISIS DEL MATERIAL DE CONTROL

1. Lea cuidadosamente el capítulo del Libro Instructivo correspondiente a este Subprograma.
2. Revise la tabla de códigos antes de procesar el material enviado.
3. No olvide incluir un control positivo para las técnicas empleadas
4. Procese las muestras como una más dentro de la rutina diaria.
5. Guarde las láminas teñidas o el resto de muestra hasta recibir el informe de resultados de la evaluación.

INFORME DE RESULTADOS

1. Informe su respuesta en la planilla de resultados adjunta.
2. Complete toda la información solicitada, con los códigos correspondientes.
3. Los resultados deben informarse dentro del plazo estipulado en la Hoja de Respuesta de cada envío.
4. Frente a cualquier inconveniente presentado con le material enviado por favor informar a la brevedad.

Frente a cualquier inconveniente presentado con le material enviado, por favor informar a la brevedad para tener opción a un nuevo envío.