



ÁREA PARASITOLOGÍA SUB PROGRAMA SEROLOGIA PARA ENFERMEDAD DE CHAGAS

INSTRUCTIVO MANEJO DE MATERIAL DE CONTROL

En el sobre encomienda, usted encontrará el material de control suministrado para esta evaluación sueros o plasmas de origen humano, analizados por las técnicas de Inmunofluorescencia indirecta, ELISA y Western Blot.

PRECAUCIONES

El material de control posee serología negativa para el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), Hepatitis B y Hepatitis C. Sin embargo debe ser considerado como potencialmente infeccioso, por lo tanto, debe manipularse con todas las medidas de bioseguridad según precauciones estándar.*

CONSERVACIÓN

Se recomienda conservar las muestras refrigeradas (entre 2 y 8 °C) hasta su procesamiento. No obstante lo anterior, si se mantiene a temperatura ambiente, por un corto período de tiempo (2-3 días), no sufrirán deterioro.

*Precauciones Universales con Sangre y Fluidos Corporales, folleto Normas de Aislamiento y Manual de Procedimientos. 1988. MINSAL

*Manual de Bioseguridad en el Laboratorio 3ra Ed., 2006. OMS.

ANÁLISIS DEL MATERIAL DE CONTROL

Lea cuidadosamente este instructivo antes de procesar el material de control.

- 1) Procese la muestra como una más dentro de la rutina diaria.
- 2) Guarde las muestras hasta recibir el informe de resultado de la evaluación.

INFORME DE RESULTADOS

- 1) Informe su respuesta vía correo electrónico en el formulario de resultados enviado a su email. En caso de no haberlo recibido informar inmediatamente a chagastamizaje.peec@ispch.cl
- 1) Complete toda la información solicitada, con la codificación correspondiente de acuerdo a lo estipulado en el **CD instructivo PEEC 2011**.
- 3) En el caso de realizar el diagnóstico por ELISA, además de informar positivo o negativo, anote el cut off y la absorbancia óptica de las lecturas de las muestras y los controles, según código. Si su lectura es visual, informe en cruces la reactividad según el reactivo empleado.
- 4) Si efectúa inmunofluorescencia indirecta, además de informar positivo o negativo, anote el título del suero control y título de material de control, según código del CD.
- 5) Los exámenes deben realizarse e informarse dentro del plazo estipulado en cada envío.

Para consultas sobre el llenado del formulario de respuesta vía mail escribir a soporte.peec@ispch.cl