



Evaluación de Reactivos Comerciales, por el Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología, para el diagnóstico serológico de la infección por *Trypanosoma cruzi*, período 2000 - 2014.

Nombre del Reactivo	Fabricante	Representante	N° Lote	Sensibilidad %	Especificidad %	Año de la evaluación	Banco de Sangre	Laboratorio Clínico
CHAGATEST ELISA recombinante v3.0 Evaluación Manual	WIENER LAB., ARGENTINA	LABIN CHILE S.A.	906536	100	98,8	2000	X	X
TEST ELISA PARA CHAGAS II Evaluación Manual	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	800602	100	98,8	2002	X	X
INMULITE CHAGAS IgG Evaluación Manual	DIAGNOSTIC PRODUCTS CORPORATION	CLINITEST LTDA	LKCS 10105	96,9	76,4	2003		
TEST ELISA PARA CHAGAS III Evaluación Manual	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	1140703	100	100	2003	X	X
BIOELISA CHAGAS Evaluación Manual	BIOKIT S.A	JHONSON & JHONSON DE CHILE S.A	C 1403	100	100	2003	X	X
ELISA CRUZI Evaluación Manual	BIOMERIEUX BRASIL S.A	BIOMERIEUX CHILE S.A	50201	100	97,3	2006	X	X
*SMART COMB CHAGAS Ab Evaluación Test Rápido	SMARTEST DIAGNOSTICS,ISRAEL	COMERCIAL A&B S.A	708282	98,9	70,7	2008		
TEST ELISA PARA CHAGAS III Evaluación Manual	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	BIOS CHILE, INGENIERIA GENETICA S.A	231007	100	100	2008	X	X
CHAGATEK ELLISA Evaluación Manual	LABORATOTIO LEMOS SRL ARGENTINA	BIOMERIEUX CHILE S.A	080310	100	99	2008	X	X
SMART COMB CHAGAS Ab Evaluación Test Rápido	SMARTEST DIAGNOSTICS,ISRAEL	COMERCIAL A&B S.A	080525	98.6	97.3	2008		X
ARCHITECT Chagas Evaluación Equipo automatizado	ABBOTT DIAGNOSTICS	TECNIGEN S.A	94154HN00	100	100	2011	X	X
CHAGATEST ELISA recombinante v.4.0 Evaluación Manual	WIENER LAB., ARGENTINA	LABIN CHILE S.A.	1008049150	100	94	2011	X	X
WL CHECK CHAGAS	WIENER LAB. GROUP	LABIN CHILE S.A	1209094160	97 (91,5-99)	99 (94,6-99,8)	2013		X
LIASON XL MUREX CHAGAS	DIASORIN	GRUPOBIOS S.A	187010X	100 (96,3-100)	100 (96,3-100)	2014	X	X

Requisitos de calidad

100% de Sensibilidad y >95% de Especificidad para Banco de Sangre.
>98% de Sensibilidad y >95% de Especificidad para Laboratorios Clínicos.

Según la información recolectada a través del programa de Evaluación Externa de la Calidad, subprograma de serología de Enfermedad de Chagas Tamizaje, los Reactivos comerciales utilizados en Bancos de Sangre y Laboratorios clínicos del País para la detección de anticuerpos contra *T.cruzi* del año 2013 son los siguientes.

