

Nombre del trámite	IDENTIFICACIÓN DE CRIOGLOBULINAS POR PRECIPITACIÓN EN FRÍO
Código	2210053
Descripción	<p>Proteínas que tienen la propiedad de precipitar en frío. Se clasifican en tres tipos y se asocian a enfermedades: tipo I, en mieloma, macroglobulinemia de Wälldenstrom, leucemia linfocítica crónica; tipo II en artritis reumatoidea, Síndrome de Sjögren, crioglobulinemia esencial mixta; tipo III en lupus eritematoso sistémico (LES), artritis reumatoidea, S. de Sjögren, mononucleosis infecciosa, infecciones por citomegalovirus, hepatitis crónica activa, cirrosis biliar primaria, glomerulonefritis (GNF) post estreptocócica.</p>
Detalles	<p>Ensayos: Determinación Crioglobulinas. Métodos: Precipitación en frío. Requisitos previos: Ayuno de 8 horas. Tipo de Muestra: Sangre sin anticoagulante, muestra con requisitos especiales tomada en ISP. Volumen muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pediátrica: 2 mL. – Adulto: 5 mL. <p>Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra correctamente identificada (tubo y formulario). • Tubo rotulado con nombre completo del paciente. • Tubo cerrado hermético. • Toma de muestra sólo en ISP los lunes y martes en horario establecido, previa coordinación con un profesional de Sección Inmunología para su agendamiento. Teléfonos: 225755412 - 413 - 414 - 415 o a sus anexos Red MINSAL 255412-255413-255414-255415. • Sólo se aceptará examen solicitado por médico especialista con indicación de sospecha diagnóstica, diagnóstico o seguimiento. <p>Condiciones de almacenamiento y transporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: Conservar a 37°C hasta 1 hora desde tomada la muestra en ISP. • Transporte: triple embalaje. <p>Criterio de rechazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra sin formulario de solicitud. • Tubos sin rotular o con rótulo inadecuado. • Tubos primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario. • Muestra lipémica o hemolizada. • Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra. • Muestra fuera del rango de temperatura solicitado. • Incumplimiento del tiempo de toma de muestra. • Muestra tomada externamente.

Beneficiarios	Usuarios públicos y privados procedentes de los centros asistenciales.
Documentos requeridos	Formulario de Solicitud Examen Inmunológico
Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?	<p>1. Trámite presencial:</p> <p>Procedimiento de envío, recepción y entrega de resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preparación de la muestra Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior. – La muestra es tomada en el ISP: Dirigirse al área de Atención Usuario. – Horarios de atención: <ul style="list-style-type: none"> – Toma de muestras (ISP): 8:00 a 10:00 hrs., lunes y martes. – Pago de arancel <ul style="list-style-type: none"> – Cancelar el arancel en la caja ubicada en el mismo piso, presentando el comprobante de recepción. – Exentos de pago: pacientes o instituciones con convenio vigente, presentando comprobante de recepción. – Proceso analítico y entrega de resultados El laboratorio del ISP efectuará el análisis correspondiente. En los casos en que se emita informe de resultados, estos podrán ser entregados mediante las siguientes modalidades: <ul style="list-style-type: none"> – Retiro presencial: por paciente o cliente, con comprobante de recepción. – Retiro por terceros: requiere fotocopia de la cédula de identidad del paciente, poder notarial simple que autorice al tercero y comprobante de recepción. – Retiro por estafetas: autorizados y validados anualmente por el ISP para cada centro asistencial. – Envío desde Oficina de Partes ISP: a usuarios o a provincias, a la dirección indicada en el formulario. – Consultas online a través de plataforma SIAC https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS
Tiempo realización	3 días hábiles.
Vigencia	De acuerdo con la indicación médica.
Costo	Ver Costo
Marco legal	Decreto Fuerza Ley N° 1 de 2005. Artículos 9 y 57.