

Nombre del trámite	SEROTECA MENSUAL Y MANTENCIÓN EN LISTA DE ESPERA
Código	2220028
Descripción	Muestra mensual de suero del receptor en lista de espera de trasplante que se conserva para ser utilizada en las pruebas de crossmatch con los potenciales donantes.
Detalles	<p>Ensayos: No aplica.</p> <p>Métodos: No aplica.</p> <p>Requisitos previos: Indicar fecha de última transfusión si aplica de acuerdo con calendario.</p> <p>Tipo de Muestra: Sangre total sin aditivo en tubo al vacío o suero.</p> <p>Volumen muestra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pediátrica: 5 ml sangre total o 3 ml de suero. • Adulto: 10 ml de sangre total o 5 ml de suero. <p>Criterio de aceptación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra correctamente identificada (tubo y formulario). • Tubo rotulado con nombre completo del paciente. • Tubo cerrado hermético. • Recepción en el laboratorio ISP antes de 72 hrs de extraída. • Casos excepcionales son autorizados por la jefatura. <p>Condiciones de almacenamiento y transporte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almacenamiento: <ul style="list-style-type: none"> – Sangre total: conservar a temperatura ambiente hasta 25 °C. No congelar. Enviar al ISP dentro de las 72 horas desde la extracción. – Suero: conservar entre 2° y 8°C hasta 72 hrs y enviar con unidades refrigerantes. Para tiempos superiores congelar y mantener entre -20°C y -70°C y enviar con hielo seco. • Transporte: triple embalaje. <p>Criterio de rechazo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muestra sin formulario de solicitud. • Tubos sin rotular o con rótulo inadecuado. • Tubos primarios quebrados o muestra derramada en el contenedor secundario. • Discordancia entre la identificación del formulario y los datos de la muestra. • Muestra fuera del rango de temperatura solicitado. • Incumplimiento del tiempo de toma de muestra.
Beneficiarios	Pacientes candidatos a trasplante.
Documentos requeridos	<ul style="list-style-type: none"> – Formulario de Seroteca (varios receptores) - Sección Histocompatibilidad. – Formulario solicitud de Seroteca individual y/o anticuerpos anti HLA en trasplante

<p>Paso a paso: ¿cómo realizar el trámite?</p>	<p>1. Trámite presencial: Procedimiento de envío y recepción muestras:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Preparación de la muestra Reunir los antecedentes y documentación mencionados en el punto anterior. – Entrega de la muestra <ul style="list-style-type: none"> – Entrega presencial: Dirigirse a la Sección de Gestión de Muestras del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), Av. Marathon N°1000, Ñuñoa, Santiago. – Envío por estafeta o courier: Entregar la documentación requerida en la recepción, donde se proporcionará un comprobante de recepción. – Si la muestra es tomada en el ISP: Dirigirse al área de Atención Usuario. – Horarios de atención: – Toma de muestras (ISP): 8:00 hrs. a 12:00 hrs. de lunes a viernes, excepcional y autorizada por la sección. – Recepción de muestras: lunes a jueves: 8:00 a 17:00 hrs. – Pago de arancel <ul style="list-style-type: none"> – Cancelar el arancel en la caja ubicada en el mismo piso, presentando el comprobante de recepción. – Exentos de pago: pacientes o instituciones con convenio vigente, presentando comprobante de recepción. – Consultas online a través de plataforma SIAC https://siac.ispch.gob.cl/ES/AtencionCiudadana/OIRS
<p>Tiempo realización</p>	<p>No aplica.</p>
<p>Vigencia</p>	<p>Las muestras de suero se mantienen en custodia por 2 años en el laboratorio de acuerdo con la sensibilización del paciente.</p>
<p>Costo</p>	<p>Ver Costo</p>
<p>Marco legal</p>	<p>Ley N° 19.451, Establece Normas sobre Trasplante y Donación de Órganos. Ley N° 19.880, Establece Bases de los Procedimientos administrativos que rigen de los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.</p>